


EQUIPO APS-DESTROYER® Destructor de agujas

Manual técnico de instrucciones (Versión 1.3)

Descripción:

El producto está diseñado para destruir la aguja desechable de punción seca APS o acupuntura AGP, ampliamente utilizada en hospitales y clínicas y así evitar la generación de contaminación. Este dispositivo puede derretir la aguja. También tiene función esterilizadora. Funciona con corriente alterna, sólo genera una pequeña cantidad de residuos y es sencillo de limpiar sin ningún contaminante.

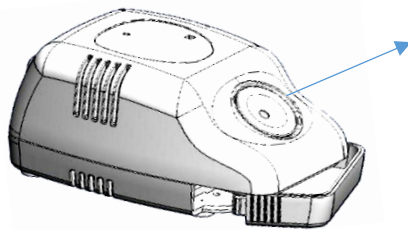

Colocar la tapa de silicona negra para proteger de las chispas al destruir las agujas


El equipo combina el polo-plata y la baja tensión (CA ± 7 V) para convertir en polvo la aguja, en tal solo 3 segundos. Ecológico.

No produce ninguna contaminación, produce solamente un poco de desperdicios, estos desperdicios pasan a ser desecho común, ya que para destruir el metal el equipo induce temperaturas sobre él muy superiores a las que resiste cualquier organismo biopeligroso, siendo el proceso entero muy limpio. Estos equipos sustituyen a los botes de recogida de productos biopeligrosos.

Indicador trabajos

- Cuando la máquina trabaja más de la cuenta, se forzaría a apagarse para evitar un sobrecalentamiento (situación normal). El indicador de alimentación se apagará automáticamente. Volverá a la normalidad después de 3-5 minutos, el indicador se encenderá (bajo una fuente de corriente alterna normal).
- Si la bandeja de desperdicios no puede entrar después de presionar hacia fuera, por favor utilice un cepillo o herramientas similares para limpiar.
- Cuando no use la máquina por un tiempo prolongado, por favor apague el botón.
- “Energía ” (Verde) : La máquina empieza a fundir la aguja cuando el indicador se enciende, y es normal que suelte chispas durante el derretimiento.
- “Sobrecalentamiento” (Rojo): La máquina empieza la protección del circuito y en este momento el circuito no puede derretir la aguja, porque está bajo protección.

- “Caja llena” (Rojo) : Significa que la caja de residuos está llena y tiene un sonido de alarma cuando el indicador chispea.

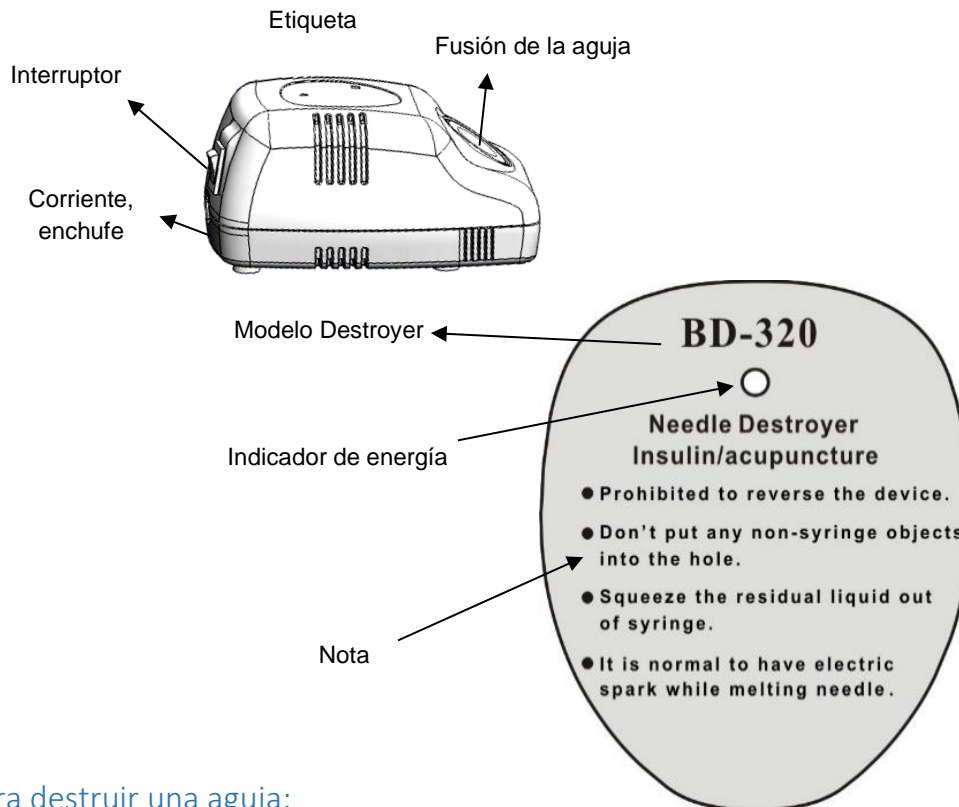

Para destruir una aguja:

Ponga una aguja en el agujero que destruye la aguja, en el momento, el indicador del trabajo se iluminará, entonces presione lentamente, la aguja se destruirá en el plazo de 3 segundos, es normal que se produzcan destellos en el agujero durante el proceso.

AVISO ⊗

No ponga otro objeto que no sea una aguja en los agujeros.


Atención especial:

No ponga su dedo en los agujeros, si no, puede lastimar su dedo gravemente.

Limpie los desperdicios:

El cajón de los desperdicios está bajo fondo del aparato normalmente, puede contener porciones de los desperdicios (más de 300 agujas), después el cajón se ha de vaciar y limpiar.

El cajón puede ser separado presionando el borde del cajón adelante como el cuadro 10, el cajón rebotará, después de limpiarlo, colóquelo otra vez en su lugar.

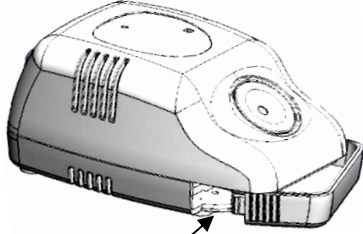

Presione hacia dentro el cajón y gire hacia la derecha al mismo tiempo que lo saca.

Características Técnicas:

- Puede destruir agujas (trabajando con la CA.)
- Power: 220V/110V $\pm 10\%$, 50/60 $\pm 1\text{Hz}$ A.C. < 130VA
- Medidas: y Peso:
28.5x20x14.7 cm
2.25 Kg.

Instrucciones etiquetaje



Ten cuidado



Resistente a la humedad



No poner más de tres niveles de peso por encima



Ambiente de trabajo: +10 °C—+40 °C



Etiquetaje de alarma consultar en el manual de operaciones

Normativa aplicada al equipo:

El equipo está certificado CE por SGS según las normativas de la UE:

89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC
AGU-PUNT SL
C/ Casp 158 local
08013 Barcelona (SPAIN)
Tel. +34934571667
Web: www.agu-punt.com